



Een juiste wond-
behandeling start met
een goede reiniging



De verschillende stappen van een juiste wondbehandeling



Reinigen, waarom?



Referentie: Kris Bernaerts, VPK Wondzorg, UZ Leuven

International Wound Infection, Institute (IWII) Wound Infection in Clinical Practice. Wounds International. 2022.

Mechanisch reinigen

Keuze tussen **twee standen**:



Krachtige straal

Brede, zachte straal

Samenstelling

- ▶ **Isotone oplossing: prikt niet**
- ▶ **Bevat polysorbaat:** verlaagt de oppervlaktespanning tussen vloeistoffen en het wondbed waardoor het mechanisch debridement tijdens reiniging wordt bevorderd
- ▶ **Bevat citroenzuur:** een zure pH belemmert de groei van bacteriën



Hoe gebruiken?



Draai de sproeikop naar de 'Spray' (nevel) of de 'Stream' (straal) positie door gelijktijdig het lipje onder de kop naar omhoog te duwen.



Sproei de vloeistof in de wond. Gebruik absorberend papier om overtollige Flamirins® op te vangen.



Dep de wond voorzichtig droog.



Plaats de sproeikop in de 'Stop' positie.

Flamirins® samengevat

- 1 Door de wond te spoelen met Flamirins® **vermindert het risico op infectie.**
- 2 Flamirins® is **gemakkelijk in gebruik** (vraagt geen lange inwerkingstijd).
- 3 Flamirins® **reinigt door te spoelen**, in nevel- of straalstand.
- 4 Flamirins® met zure pH kan het **wondgenezingsproces ondersteunen.**
- 5 Flamirins® bevat **polysorbaat** waardoor micro-organismen gemakkelijk kunnen worden verwijderd.



Bestelinformatie: Flamirins® 250 ml
CNK code: 1409-374 / Art. code: 1102



Product range

Een oplossing voor elk stadium & voor elk type wond



Reinigen

- ▶ **Isotone oplossing**, zure PH
- ▶ **Geen irritatie**, prikt niet
- ▶ **Niet nodig in de wond te wrijven** dankzij de spray



Oppervlakkige wonden

- ▶ **Snel en langdurig verkoelend effect**
- ▶ **Barrière** tegen externe contaminatie



Licht tot matig exsuderende oppervlakkige of diepe wonden

- ▶ **Alginaatgel** met uniek enzymstelsel



Matig tot zwaar exsuderende oppervlakkige of diepe wonden



 **Flen Health**

Flen Health NV

www.flenhealth.com

info@flenhealth.com